

NÁVOD K POUŽITÍ

MonitorBaby



ERAU s.r.o.

Vlašimská 120, 257 26 Divišov

IČO: 033 63 368

MonitorBaby - návod k použití

Péče o děti je krásná a obohacující, ale často stresující. Strach o miminko často nedává rodičům tolik potřebný klid a pohodu, kterým by zahrnuli svého potomka. Tím ho však zbavují pocitu bezpečí a pokud je stres rodičů přehnaný, možnosti se zdravě vyvíjet.

MonitorBaby je přístroj, který pomáhá ochránit dítě tím, že dává rodičům (či pečujícím o dítě) možnost včasného zásahu.

MonitorBaby snímá přes matraci pohybovou aktivitu dítěte, spustí zvukový a vizuální alarm v případě absence jakéhokoliv pohybu do 20 sekund.

MonitorBaby je určen jako doplněk v péči o kojence, kdy rodiče nemohou být fyzicky přítomni u postýlky či ohrádky dítěte a nebo pro dobu, kdy rodiče spí a tedy nemohou aktivně dohlížet na kojence.

MonitorBaby nenahrazuje lékařský dohled a není zdravotnický prostředek.

MonitorBaby je určen do domácího prostředí pro zdravé děti kromě kojenců, kteří vyžadují stálý lékařský dohled.

POZOR:

Přístroj „MonitorBaby“ monitoruje a varuje, ale nenahrazuje dozor pečující osoby.

Technické parametry (Charakteristika)

- Napájení bateriemi AA 1,5 V., spotřeba energie přibližně 1 mA
- Životnost baterií přibližně 6 měsíců, při použití alkalické baterie
- Hlasitost výstrahy standardně 85dB SPL do vzdálenosti jednoho metru
- Standardní osvětlení 2mcd

Obr. č. 1




Obsah balení:

- kontrolní jednotka
- dvě senzorové podložky
- spojovací kabel
- závěsné rameno (viz obr. č. 3)
- návod k použití


Popis kontrolní jednotky

- Spínač On/Off pro zapnutí pod ochranným krytem
- Zelená kontrolka aktivovaná pohybem
- Červená kontrolka výstrahy je aktivovaná, jakmile se dýchání dítěte zastaví nebo se výrazně zpomalí
- Varovná kontrolka slabé baterie

Obr. č. 2 – pohled zepředu

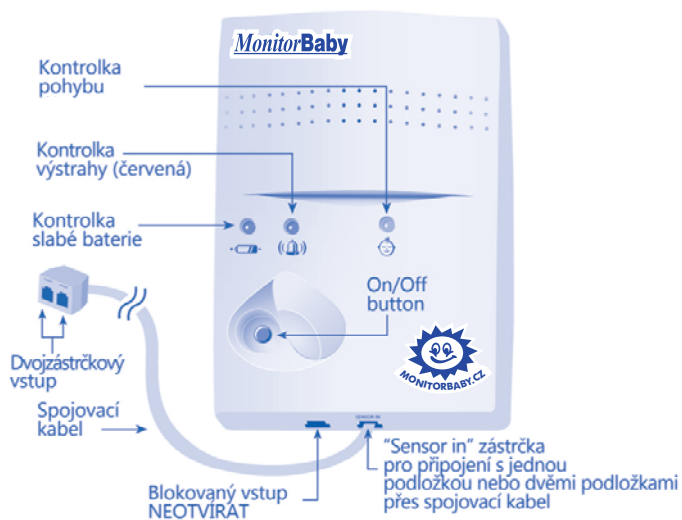

Obr. č. 3 – pohled zezadu

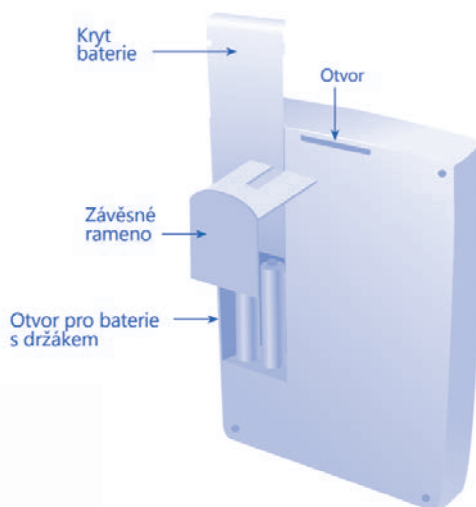

Instalace přístroje

Pokud používáte přístroj pro novorozence, potřebujete jen jednu senzorovou desku – bez spojovacího kabelu. To umožní relativně větší citlivost přístroje.

Pro děti, které se začnou otáčet a lézt, je nutné připojit i druhou senzorovou desku (s použitím spojovacího kabelu), aby byla pokryta celá plocha postýlky.

Instalace – postup

1. Umístěte jednu nebo obě senzorové podložky na rošt postýlky nebo ohrádky (**viz.obrázek č.1.**) Položte matraci pevně na horní část senzorové podložky. Matrace musí být ve styku senzorovými podložkami. Pokud dno postýlky není dostatečně pevné, použijte zpevňující podložku (např. sololit nebo překližku)
2. Sejměte kryt baterií (**viz. obrázek č.3**), vyjměte pouzdro na baterie a vložte podle značek 4 nové baterie 1,5 V shodné velikosti AA, nejlépe alkalické. Vraťte pouzdro na baterie zpět a uzavřete kryt.
3. Zapojte kabely senzorových desek do rozdvojky spojovacího kabelu, druhý konec spojovacího kabelu do vstupu na kontrolní jednotce označeného „SENSOR –IN“. **Použijete-li jednu senzorovou desku, připojte kabel přímo ke kontrolní jednotce bez použití spojovacího kabelu.**
4. Zastrčte závěsné rameno pevně do štěrbin na zadní straně řídicí jednotky a pověste ji na okraj postýlky nebo kamkoli jinam mimo dosah dítěte.

DŮLEŽITÉ

Z důvodu zabránění nebezpečí z volně visících kabelů, doporučujeme svinout přebytečné kabely a svázat je přiloženou spojkou, nebo pečlivě omotat kolem sloupků postýlky.

Příčiny chybné činnosti přístroje

Existují dvě hlavní příčiny chybné činnosti - technické příčiny chybné činnosti a chybná činnost v důsledku vlivu prostředí.

- **Technické příčiny**

Za účelem minimalizace technických obtíží postupujte pečlivě podle návodu na instalaci a provoz.

- **Vlivy prostředí**

Díky své vysoké citlivosti může být MonitorBaby ovlivněn vlivem faktorů okolního prostředí např. ventilátory, vítr, klimatizace atd. Takové vlivy prostředí mohou být zachyceny senzory podobně jako dýchací pohyby, čímž zabraňují aktivaci výstrahy nebo ji zpozdíjí.

Falešná zvuková výstraha

Možnost falešné zvukové výstrahy existuje jen ve velmi ojedinělých případech. Pokud k falešné zvukové výstraze dojde, zkontrolujte jestli nebyla způsobena nesprávným připojením sensorové podložky (podložek) ke kontrolní jednotce přístroje, nebo připojení jen jedné podložky nebo selháním sensorových podložek, které mají být přímo pod matrací. Matrace z tuhého materiálu, např. polyesterové pěny může zapříčinit falešnou zvukovou výstrahu. Také pozor na bezdrátové vysílače, některé z nich mohou způsobit falešný alarm, odstraňte je z dosahu monitoru dechu.

Péče o MonitorBaby

Tento přístroj nepotřebuje žádnou zvláštní péči kromě výměny baterií, rozsvítí-li se indikátor slabé baterie. Celou sensorovou jednotku i sensorové podložky můžete otřít vlhkým hadříkem. Nepoužívané baterie vyjměte a uložte na suchém a tmavém místě.

Pokud váš MonitorBaby vykazuje časté falešné zvukové výstrahy, svědčí to pravděpodobně o jeho poruše, kontaktujte servisní středisko.

Test funkčnosti

- Zkontrolujte, zda bliká zelená kontrolka, pokud je dítě v postýlce/ohrádce a přístroj v provozu,.
- Vezměte dítě z postýlky/ohrádky a přístroj vypněte. Po vypnutí vyčkejte 2-3 minuty než se matrace v důsledku odstranění vlivu hmotnosti dítěte narovná.
- Přístroj opět zapněte, aniž byste s postýlkou/ohrádkou hýbali
- Sledujte zelenou kontrolku
 - bliká – znamená to, že monitorBaby přijímá falešné signály pohybu z okolí.
 - nebliká – monitorBaby spustí do 20 sekund zvukovou výstrahu. Nerozezní-li se alarm, jde o technickou závadu.
- Zkontrolujte, že je alarm slyšet na všech místech potřebných pro dohlížení dítěte
- Tento kontrolní test by měl být prováděn minimálně jednou za týden.
- **Důležité:** Když vezmete dítě z postýlky/ohrádky, odejděte do vedlejší místnosti. Minimalizujete tím svůj případný vliv na test funkčnosti

Lokalizace a odstranění rušivých vlivů prostředí

Nerozezní-li se alarm po 20 sekundách, eliminujte veškeré vlivy prostředí tak, že např. změňte způsob větrání, zavřete okna, odstraníte mobilní telefony, přemístíte postýlku a podobně.

Do postýlky nedávejte další dítě nebo domácí zvíře. **MonitorBaby nemůže být používán pro dvojčata v jedné postýlce.** Nepoužívejte odpařovač nebo ventilátor přímo proti postýlce.

VAROVÁNÍ

MonitorBaby je vysoce citlivé, elektronické zařízení, s nímž musíte zacházet opatrně.

- Nezacházejte s přístrojem hrubě, neházejte s ním, neupust'te ho
- Řiďte se instrukcemi pro instalaci, aby byl přístroj zapojen bezpečně a správně
- MonitorBaby není hračka. Nedovolte dítěti žádného věku, aby přístroj sloužil ke hře.

Výroba, distribuce a servis:

ERAU s.r.o.

Vlašimská 120, 257 26 Divišov

Tel. +420 774 634 412

www.monitorbaby.cz